



Photocentrage uvex centRX

Instructions relatives au photocentrage en ligne
Détermination des paramètres pour commander des lunettes de protection et des lunettes pour écran à verres correcteurs uvex

L'outil de photocentrage uvex centRX [sentriks] est une solution Web facile à utiliser qui permet de déterminer rapidement et de manière fiable les paramètres de centrage nécessaires pour commander des lunettes de protection et des lunettes pour écran à verres correcteurs uvex.

Il offre aux clients, revendeurs et partenaires de service la possibilité de déterminer les paramètres nécessaires à l'aide d'une photo et de commander les lunettes par voie numérique.

Les exigences en matière de centrage des différents types de foyer sont intégrées dans l'application, ce qui exclut, par exemple, les erreurs de calcul dans la détermination de la hauteur de montage. À la fin du processus de centrage, un PDF récapitulatif peut être généré.

Aucune donnée n'est stockée dans le système.

MADE FOR
YOUR EYES
MADE IN UVEX



AJUSTEMENT SUR MESURE –
SIMPLE, RAPIDE, NUMÉRIQUE



Vos avantages :

Détermination autonome et individuelle de paramètres de centrage pour la commande de lunettes de protection à verres correcteurs

- ✓ Simple et numérique
- ✓ Outil Web ne nécessitant pas d'installation
- ✓ Aucune inscription n'est nécessaire
- ✓ Aucun stockage de données
- ✓ Disponible en allemand et en anglais

Ce dont vous avez besoin pour uvex centRX :

- ✓ PC, ordinateur portable ou Notebook avec navigateur Internet Edge, Chrome ou Firefox
- ✓ Formats des photos acceptés : .jpg/.jpeg/.png
- ✓ Accès à Internet



Gestion des données au cours du processus

Vous serez guidé(e) dans le menu en quelques étapes. Vous pouvez ensuite télécharger le résultat de la mesure au format PDF.

Au cours d'un processus de centrage, vous avez la possibilité de revenir aux étapes précédentes. **Une fois le centrage terminé et le PDF des résultats généré, aucune donnée n'est enregistrée.**



Accès immédiat, sans inscription

L'outil uvex centRX vous intéresse ? N'hésitez pas à ajouter notre adresse Web aux favoris de votre navigateur. Vous pouvez lancer l'application directement en ligne.

centRX.uvex-safety.com





Le guide pas-à-pas

Soyez attentif aux différents points de chaque étape du processus.



Avant de commencer

Choisir la monture et le type de foyer



Prendre une photo avec la monture sélectionnée et adaptée à son visage*



Accéder au photocentrage uvex centRX sur Internet : centRX.uvex-safety.com



Photocentrage avec uvex centRX

Télécharger une photo



Saisir les données



Optimiser la proposition de centrage



Recevoir le résultat de la mesure / Générer le PDF du résultat



Commande

Reporter le résultat de la mesure sur le formulaire de commande ou dans le système uvex



Transmettre le formulaire à uvex

*Consignes pour la prise de photos :

- Assurez-vous que la monture est droite et correctement positionnée sur la base des oreilles et le nez.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de reflets.
(Le cas échéant, retirer les verres de démonstration de la monture.)
- Veillez à tenir votre tête droite et à regarder la caméra de face.
- Pour un cadrage optimal, nous vous recommandons une prise de vue de face jusqu'aux épaules.


Centrage avec le photocentrage uvex centRX



1 **Télécharger l'image**
 Vous pouvez soit **glisser-déposer l'image** dans le champ orange, soit la sélectionner dans votre galerie en utilisant **Browse**



Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur **Next** en bas à droite

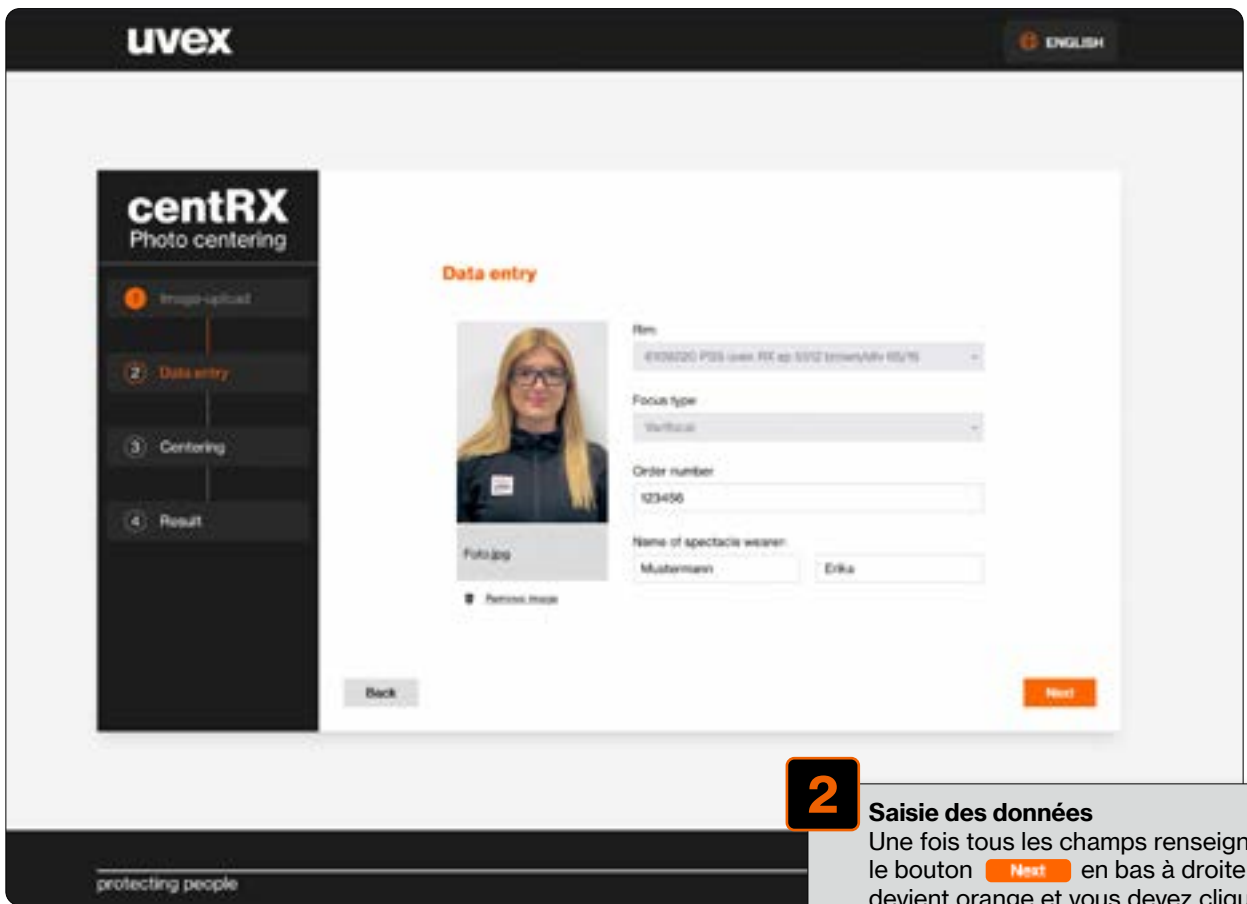

2 **Saisie des données**
 Une fois tous les champs renseignés, le bouton **Next** en bas à droite devient orange et vous devez cliquer dessus pour passer à l'étape suivante



3

Optimiser la suggestion de centrage
centRX prépare la largeur de référence. Comme il n'y a pas encore d'ajustement automatique, il faut optimiser la proposition de centrage et retravailler la mise en place des lignes en cliquant sur „Modifier le centrage“



Positionner correctement les lignes et les cercles de centrage

- Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser les points d'attache pour les positionner
- Les lignes doivent toujours être positionnées sur le bord intérieur du cadre de la monture
- Les cercles de centrage intérieurs doivent être placés sur les bords de la pupille. Si vous ne pouvez pas détecter les bords de la pupille, lisez les conseils !

Lorsque l'image vous convient, cliquez sur **Save**, puis sur **Next** en bas à droite, pour obtenir le résultat de la mesure. Via **Print the measurement result** vous pouvez générer et enregistrer le résultat en PDF.



Conseils :

Si le cadrage affiché est trop petit pour vous, vous pouvez agrandir ou réduire l'affichage de votre navigateur à tout moment à l'aide de la touche « Ctrl » et de la molette de la souris.

La ligne centrale en pointillés vous permet de contrôler si le regard vers la caméra est parallèle à l'objectif de la caméra. Le cas échéant, optimisez ici l'enregistrement et réitérez la procédure précédente.

Si, pour des raisons anatomiques, les lunettes sont légèrement de travers sur le visage, il est possible d'incliner la courbe de niveau vers la droite et vers la gauche à l'aide du cercle blanc sur le front en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.



✓ **L'œil est-il suffisamment clair pour que vous puissiez bien voir la petite pupille noire ?**
Parfait, vous pouvez maintenant placer les cercles de centrage intérieurs de manière symétrique autour des pupilles.

✗ **Les yeux sont trop foncés ou la pupille trop pixelisée ?**
Pas de problème. Modifiez la taille du cercle extérieur et placez-le sur les iris de l'œil.



Résultats en PDF

Préparer la commande uvex

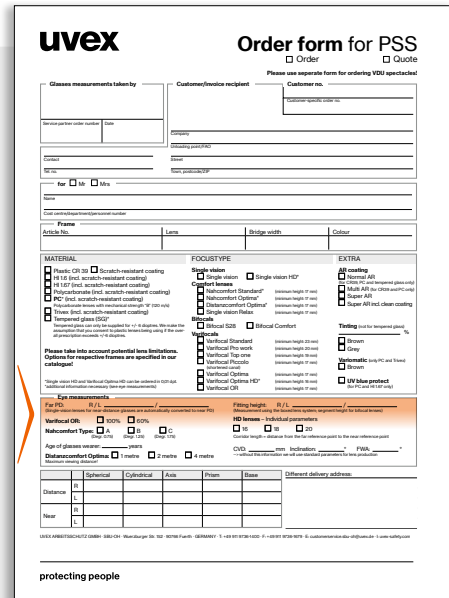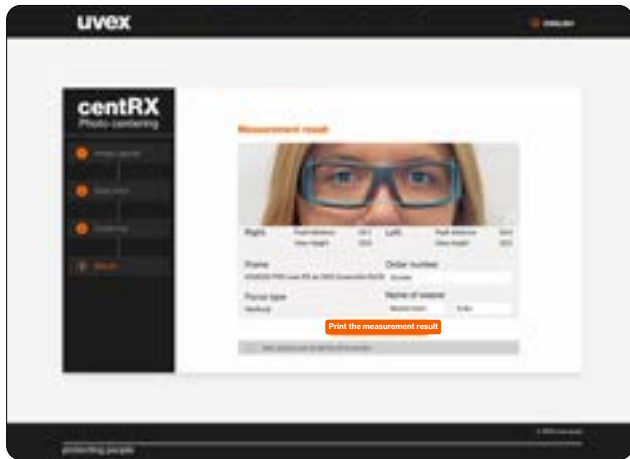

Pour commander des lunettes de protection et des lunettes pour écran à verres correcteurs uvex, veuillez reporter le résultat de la mesure directement sur le formulaire de commande ou dans le système uvex.



Checklist pour une commande uvex

Avant d'envoyer le bon de commande, veuillez vérifier que les informations suivantes sont complètes :

- Bon de commande adéquat pour le type de produit ?
- Lunettes de protection à verres correcteurs = Bon de commande pour KSB
- Lunettes pour écran à verres correcteurs = Bon de commande pour BSB
- Devis préalable ou commande directe ?
- Numéro de client et données de l'entreprise indiqués
- Numéro de commande du client indiqué
- Affectation des porteurs de lunettes indiquée
- Numéro d'article à 7 chiffres de la monture indiqué
- Matériau du verre sélectionné
- Type de foyer sélectionné
- Traitement sélectionné
- Reporter les paramètres de centrage
- Valeurs optiques indiquées
- Accessoires notés

Si toutes les données sont complètes, veuillez transmettre votre formulaire de commande par la voie habituelle.

Si des informations sont manquantes, il n'est pas possible de garantir que votre commande aboutira.



FAQ

Je n'ai pas de bon d'autorisation/ de commande ou de numéro de commande, que faire ?

Si vous êtes un particulier, vous pouvez facilement trouver l'un de nos partenaires de service dans votre région via le lien suivant :

uvex-heckel.fr/fr/ou-acheter/rechercher-un-distributeur

Je n'ai pas de modèle de monture à ma disposition pour prendre une photo

Si vous êtes un particulier, vous pouvez facilement trouver l'un de nos partenaires de service dans votre région via le lien suivant :

uvex-heckel.fr/fr/ou-acheter/rechercher-un-distributeur

Impossible de saisir la monture choisie

Est-il possible que ma mallette d'échantillons ne soit plus à jour et que le modèle sélectionné ne soit plus disponible ?

La gamme en cours de validité est présentée dans notre catalogue. Pour le consulter, veuillez cliquer sur :

uvex-heckel.fr/fr/medias/catalogues-et-brochures

Ai-je vraiment besoin d'indiquer un nom – compte tenu de la protection des données personnelles ?

La paire de lunettes fabriquée spécialement doit être remise au porteur concerné. Vous pouvez également utiliser une abréviation, un numéro d'employé, etc. Cet identifiant doit rester le même pour les commandes ultérieures afin de maintenir un historique cohérent.

Dois-je enregistrer le résultat de la mesure ?

Pour effectuer une commande uvex, les données de mesure doivent être reportées sur le formulaire de commande. Nous vous recommandons de conserver les données pour toutes demandes ultérieures.

Où dois-je envoyer ma commande si je n'ai pas encore les coordonnées d'uvex ?

• France: support.RX@uvex-heckel.fr

Qui puis-je contacter si j'ai des questions sur l'utilisation de l'outil uvex centRX qui ne sont pas mentionnées ici ?

Photocentrage uvex centRX

T: +33 (0)3 88 07 61 08

E: support.RX@uvex-heckel.fr

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
SBU Occupational Health
Wuerzburger Str. 152
90766 Fuerth
GERMANY

T: +49 (0) 911 9736 1400
F: +49 (0) 911 9736 1679
E: customerservice.sbu-oh@uvex.de
I: uvex-safety.com

UVEX HECKEL s.a.s.
44 rue d'Engwiller
La Walck
67350 Val de Moder
FRANCE

T: +33 3 88 07 61 08
F: +33 3 88 72 51 06
E: contact.france@uvex-heckel.fr
I: uvex-safety.fr
heckel.fr

UVEX Protection au Travail
(Suisse) SA
Uferstrasse 90 - Postfach
4019 Basel
SUISSE

T: +41 61 638 84 44
E: info@uvex.ch
I: uvex-safety.ch
heckel-safety.ch